

**Ovation Hybrid Night Splint/  
Orteza na opadającą stopę  
Numer katalogowy/Catalogue number:  
OV3001**



Instrukcja użytkowania/  
User's manual

CE

Ovation Hybrid Night Splint Orteza na opadającą stopę

Odepnij wszystkie pasy.

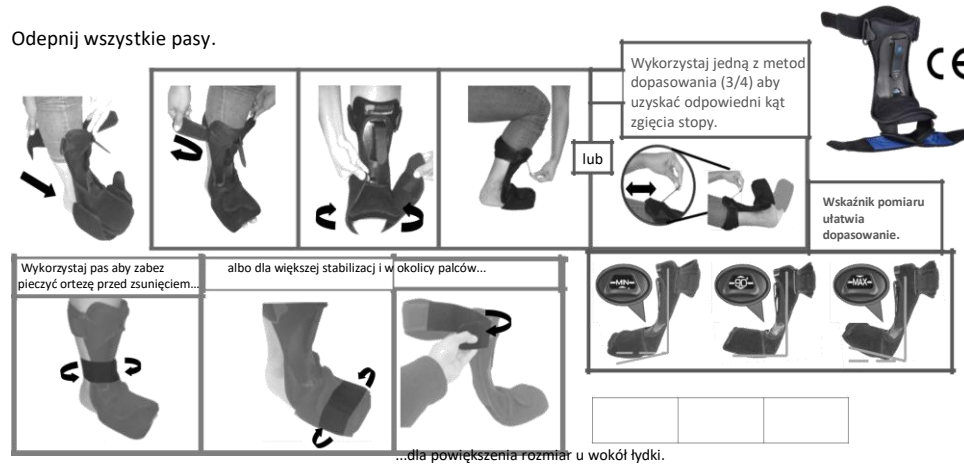


Tabela rozmiarów według noszonego obuwia:

Rozmiar	Mężczyźni	Kobiety
S-M	39-42,5	37,5-42,5
L-XL	43-49	43-48

Dodatkowa taśma stabilizująca dla wszystkich rozmiarów.

Uwaga:

Orteza powinna być zawsze stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty. Przed użyciem ortezi należy szczegółowo przeczytać instrukcję obsługi. Jeśli podczas użytkowania ortezi odczuwasz dyskomfort, pojawia się opuchlizna lub podrażnienia skóry należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. The Hybrid Night Splint nie jest przeznaczony do długotrwałego korzystania.

**ZASTOSOWANIE:**

Zapalenie rozciągniętego podszwawego,  
Porażenie nerwu strzałkowego,  
Stany pooperacyjne prostowników goleni i stopy.

**PRZECIWSKAZANIA:**

- Żylaki kończyny dolnej,
- Stany zapalne i podrażnienia skóry w obrębie działania ortezi,
- Obrzęki goleni i stopy,
- Stopa cukrzycowa,
- Wady wrodzone stóp oraz utrwalone deformacje,
- Spastyczność

**KONSERWACJA:** Przetrzeć mokrą szmatką, nie używać silnych detergentów, suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła.

**SKŁAD MATERIAŁOWY:**

Rama wykonana z polipropylenu. Wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu. Bez dodatku lateksu.


Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze swoim przedstawicielem.



Wytwórca: www.ovationmed.com  
Ovation Medical  
5155 Clareton Drive, Agoura Hills, CA 91301, 800.403.6466

Ovation Hybrid Night Splint

BEGIN Unfasten ALL straps

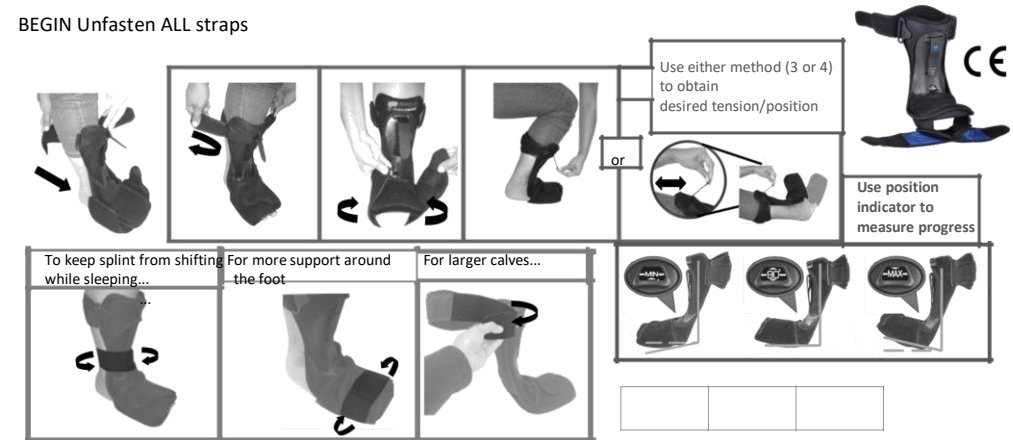

Uses for accessory strap are not limited to these options. Patient can customize use of strap as needed or as directed by your health care provider.

Size	Shoe size (man)	Shoe size (women)
S-M	39-42,5	37,5-42,5
L-XL	43-49	43-48

**USE**

Inflammation of plantar aponeurosis;  
Peroneal nerve injury;  
Post-operative conditions of shin and foot.

**CAUTION:**

The Hybrid Night Splint is not intended for continuous walking. Please consult your health care provider for specific instructions.

In the event of discomfort or numbness of any kind when using this product, consult your health care provider immediately. Do not pull strap too tightly.

**Material composition:**

The frame is made of polypropylene. The insert is made of a foam of open cells brushed nylon. Without Clareton Dr.



Distributor:

mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24,  
tel. +4842 748384, fax.+48426365221, www.mdh.pl, export@mdh.pl